

Приложение 1
к приказу
от « 9 » июня 2024г. № 88-00

**Перечень реабилитационного оборудования пункта проката
службы «Домашний микрореабилитационный центр»**

№ п/п	Наименование ТСР, передаваемое на временное пользование	Инвентарный номер	Балансовая стоимость
1.	Веб-камера Logitech HD Webcam C310	410134000001389	2 999,00
2.	Веб-камера Logitech HD Webcam C310	410134000001390	2 999,00
3.	Веб-камера Logitech HD Webcam C310	410134000001391	2 999,00
4.	Ноутбук ASUS VivoBook	410134000001392	60 999,00
5.	Ноутбук ASUS VivoBook	410134000001393	60 999,00
6.	Ноутбук ASUS VivoBook	410134000001394	60 999,00
7.	Планшет Lenova Tab P12 Pro	410134000001395	55 999,00
8.	Планшет Lenova Tab P12 Pro	410134000001395	55 999,00
9.	Планшет Lenova Tab P12 Pro	410134000001395	55 999,00
10.	Многофункциональный тренажер для активных и пассивных тренировок	410134000001399	33 330,80
11.	Тренажер-балансир	410134000001400	4 814,43
12.	Тренажер, препятствующий выворачиванию стопы	410134000001401	41 478,33
13.	Тренажер для сгибания и разгибания пальцев	410134000001402	16 295,06
14.	Тренажер для рук и ног	410134000001403	4 444,11
15.	Вертикализатор динамичный	410134000001404	238 500,38
16.	Педальный тренажер с электродвигателем	410134000001405	81 475,29
17.	Велосипед для детей с ДЦП	410134000001406	37 034,22
18.	Велосипед тренажер для детей с ДЦП на разный возраст	410134000001407	29 627,38
19.	Компрессионный лимфодренажный массажер для ног	410134000001409	28 031,00
20.	Компрессионный лимфодренажный массажер для ног	410134000001410	28 031,00

21.	Вертебральный–тренажер свинг-машин	410143000001411	19 593,33
22.	Массажер для тела электрический	410134000001412	7 439,67
23.	Массажер для стоп деревянный роликовый	410134000001413	814,00
24.	Массажная подушка	410134000001414	9 403,33
25.	Массажный матрас	410134000001415	41 196,67
26.	Детская беговая дорожка	2101340105	9 000,00
27.	Диск-балансир	41013600000783	2 800,00
28.	Степплатформа двухуровневая	41013600000783	8000,00
29.	Велоэргометр детский механический	21013400000921	33 000,00
30.	Детский тренажер «Бегущая по волнам»	2101040062	3 700,00
31.	Кресло-коляска для инвалидов	21013600000961	25 500,00
32.	Утяжеленное одеяло	21013600000818	11 990,00
33.	Стул детский ортопедический	МО 109	8 025,00

**Инструкция
по применению реабилитационного оборудования пункта проката
службы «Домашний микрореабилитационный центр»**

Детская беговая дорожка (механическая)

- Рекомендованный возраст ребенка: 3-7 лет.
- Не предназначен для детей, чей вес превышает 68кг
- Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
- Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
- Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
- Ребенок должен обязательно надеть обувь перед использованием тренажера.
- Надевайте подходящую одежду для использования тренажера.
- Избегайте одежды свободного покроя, которая может попасть в тренажер или которая ограничивает и затрудняет движения.
- Не позволяйте детям стоять на тренажере.
- Если какая-либо деталь тренажера сломана, немедленно прекратите его использование.
- Тренажер необходимо проверять взрослому перед каждым использованием. Все болты и гайки необходимо подтягивать перед каждым использованием.
- Взрослый должен проинструктировать детей перед использованием.
- Установите тренажер на плоской ровной поверхности.
- Неправильное или чрезмерное использование может привести к травмам.
- Немедленно прекратите тренировку, если ребенок почувствует головокружение, потерю сознания или истощение.
- Пользоваться тренажером можно только в присутствии взрослого.

Диск-балансир

Спортивный тренировочный мини комплекс для балансировки тела основа диска из прочной березовой фанеры. Развивает координацию движений и вестибулярный аппарат.

- Не предназначен для детей, чей вес превышает 80 кг.
- Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
- Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
- Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
- Установите тренажер на плоской ровной поверхности.
- Пользоваться тренажером можно только в присутствии взрослого.

Степплатформа двухуровневая

Работа, выполняемая ногами. Для изменения интенсивности тренировки достаточно лишь изменить высоту платформы. Это отличное средство для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

- Не предназначен для детей, чей вес превышает 100 кг.
- Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
- Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
- Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
- Установите тренажер на плоской ровной поверхности.
- Пользоваться тренажером можно только в присутствии взрослого.

Велоэргометр детский (механический)

Велотренажеры прекрасно развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а заодно тренируют мышцы ног и спины. Работа на детском велоэргометре осуществляется путем имитации езды на велосипеде длительностью - от 3 до 5 минут, через каждую минуту детям предлагается отдых в течение 30 - 40 секунд. Возраст ребенка, использующего данное оборудование от 3-8 лет (максимальный вес пользователя не более 50 кг.).

- Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
- Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
- Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
- Надевайте подходящую одежду для использования тренажера.
- Избегайте одежды свободного покроя, которая может попасть в тренажер или которая ограничивает и затрудняет движения.
- Не позволяйте детям стоять на тренажере.
- Если какая-либо деталь тренажера сломана, немедленно прекратите его использование.
- Тренажер необходимо проверять взрослому перед каждым использованием. Все болты и гайки необходимо подтягивать перед каждым использованием.
- Взрослый должен проинструктировать детей перед использованием.
- Установите тренажер на плоской ровной поверхности.
- Неправильное или чрезмерное использование может привести к травмам.
- Немедленно прекратите тренировку, если ребенок почувствует головокружение, потерю сознания или истощение.
- Пользоваться тренажером можно только в присутствии взрослого.

Детский тренажер «Бегущая по волнам»

Детский тренажер «Бегущая по волнам» предназначен для укрепления мышц ног, развития чувства равновесия, координации движений и общей моторики.

Прекрасно тренирует вестибулярный аппарат. Возраст ребенка, использующего данное оборудование от 3-8 лет (максимальный вес пользователя не более 50 кг.).

- Перед использованием проконсультируйтесь у вашего педиатра.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования этого оборудования.
- Никогда не используйте вблизи проходов, наклонных поверхностей, дорог, бассейнов или водоемов.
- Никогда не позволяйте более чем одному ребенку (1) использовать тренажер одновременно.
- Ребенок должен обязательно надеть обувь перед использованием тренажера.
- Надевайте подходящую одежду для использования тренажера.
- Избегайте одежды свободного покроя, которая может попасть в тренажер или которая ограничивает и затрудняет движения.
- Не позволяйте детям стоять на тренажере.
- Если какая-либо деталь тренажера сломана, немедленно прекратите его использование.
- Тренажер необходимо проверять взрослому перед каждым использованием. Все болты и гайки необходимо подтягивать перед каждым использованием.
- Взрослый должен проинструктировать детей перед использованием.
- Установите тренажер на плоской ровной поверхности.
- Неправильное или чрезмерное использование может привести к травмам.
- Немедленно прекратите тренировку, если ребенок почувствует головокружение, потерю сознания или истощение.
- Пользоваться тренажером можно только в присутствии взрослого.

Кресло-коляска для инвалидов

Кресло-коляска предназначена для передвижения детей с ДЦП и другими функциональными нарушениями. Данная модель отличается наличием различного рода фиксаторов, что особенно важно для данной категории пациентов. Регулируемое сиденье и настраиваемая по углу наклона мягкая спинка легко адаптируются под потребности малыша. Для безопасности ребенка предусмотрены ручной и стояночный тормоза и фиксирующие ремни.

- При посадке больного в кресло-коляску и высадке из него колеса должны быть поставлены на тормоза.
- Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке больного должны быть подняты в вертикальное положение.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

Утяжеленное одеяло

Утяжелённое одеяло оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на нервную систему. Эффект достигается за счёт сильного, но мягкого и равномерного давления на тело (уменьшение спастичности при ДЦП, оптимизация тонуса мышц при атонии и гиперкинезе, расслабление и успокоение при СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), повышение концентрации внимания).

Вертебральный-тренажер «swing-machine»

Вертебральный электромеханический массажер для разгрузки позвоночника с функцией массажа ног SM-01 разработан с помощью современной науки, технологии и традиционной медицины. Прибор сочетает в себе массаж и обработку инфракрасными

лучами, имеет 10 скоростей вибрации на выбор. Инфракрасные тепловые лампы нагреваются, пока вибрирующие элементы массируют ноги, для большего комфорта и релаксации. Ежедневное использование массажера обеспечивает существенную пользу от сбалансированного потока сил и эффективно улучшает общее здоровье и энергетические уровни.

Колебательные движения сегментов позвоночного столба в горизонтальном положении позволяют добиться физиологически правильного положения позвонков относительно друг друга, что приводит к нормализации биомеханики позвоночника, и в целом всей внутренней системы.

Тренировка: Свинг машина используется в положении лежа. Вы ложите на ровной поверхности, так, чтобы голеностопные суставы находились на каретке машины, мышцы полностью расслаблены, ноги полностью выпрямлены. Управление частотой колебаний тренажера спины осуществляется с помощью пульта.

Приложение 3

к приказу
от « 9 » сентября 2024 г. № 38-Ф

**Журнал регистрации инструктажей для родителей
(законных представителей) по применению реабилитационного оборудования и соблюдению требований техники безопасности
при эксплуатации технических средств пункта проката службы «Домашний микрореабилитационный центр»**

№ п/п	Дата проведения инструктажа	Тема инструктажа	ФИО инструктируемого	ФИО, должность инструктирующего	Подпись инструктируемого	Подпись инструктирующего